

# DEZINFEKČNÍ PROGRAM



- dezinfekce ploch a povrchů
- dezinfekce malých ploch postřikem
- odstranění zaschlých vrstev dezinfekcí
- dezinfekce nástrojů a předmětů
- dezinfekce hemodialyzačních přístrojů
- dezinfekce a hygiena pokožky

**LORIKA® CZ**

personální  
a průmyslová  
hygiena



## DEZINFEKCE PLOCH A POVRCHŮ

### DEZOX

kapalný koncentrovaný prostředek určený pro dezinfekci a čištění omyvatelných ploch a předmětů

**aktivní látky:** peroxid vodíku, KAS

**účinnost:** baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní

**vlastnosti:** snížené riziko alergických reakcí, neparfémovaný, opakovaná aplikace = kumulativní účinek

**barva:** bezbarvý

**expirace:** 12 měsíců

**balení:** kanystr 5 litrů



### SANITEN

kapalný koncentrovaný prostředek pro dezinfekci a mytí ploch

**aktivní látky:** KAS, peroxid vodíku

**účinnost:** baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, MRSA, vynikající účinek proti plísním a mykobakteriím

**vlastnosti:** výborný mycí účinek, ředí se teplou vodou (až 50°C), opakovaná aplikace = kumulativní účinek

**barva:** bezbarvý

**expirace:** 12 měsíců

**balení:** kanystr 5 litrů, láhev 1 litr



### LORISAN

kapalný koncentrovaný prostředek pro dezinfekci a mytí ploch

**aktivní látky:** glyoxal, glutaraldehyd, KAS

**účinnost:** baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní, MRSA

**vlastnosti:** po aplikaci svěže voní, výborný mycí efekt, opakovaná aplikace = kumulativní efekt

**barva:** světle tyrkysový

**expirace:** 24 měsíce

**balení:** kanystr 5 litrů



### DESUR

kapalný koncentrovaný prostředek s mycím účinkem pro dezinfekci ploch a předmětů

**aktivní látky:** glyoxal, glutaraldehyd, KAS

**účinnost:** baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní, MRSA

**vlastnosti:** příjemně parfémovaný, vhodný pro mycí stroje, opakovaná aplikace = kumulativní účinek

**barva:** zelený

**expirace:** 24 měsíce

**balení:** kanystr 5 litrů, láhev 1 litr



Pro dezinfekci malých ploch doporučujeme použít utěrky WETTASK s přípravkem GUTTAR.

### DEZIKON

granulovaný prostředek pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a prádla

**aktivní látky:** dichlorizokyanurát sodný, neobsahuje aldehydy

**účinnost:** baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní

**vlastnosti:** parfémovaný, výborné čistící schopnosti, vhodný k dezinfekci prádla

**barva:** bílý (roztok bezbarvý)

**expirace:** 24 měsíce

**balení:** dóza 3 kilogramy



## DEZINFEKCE POSTŘÍKEM

### GUTTAR

alkoholový prostředek určený k rychlé dezinfekci ploch a předmětů postřikem

**aktivní látky:** propan-2-ol, KAS, glutaraldehyd

**účinnost:** baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní

**vlastnosti:** parfémovaný, rychle zasychá, zmatňuje lakované plochy

**barva:** světle růžový až bezbarvý

**expirace:** 24 měsíce

**balení:** kanystr 5 litrů, láhev 1 litr, láhev 0,5 litru s rozprašovačem



## ODSTRANĚNÍ ZASCHLÝCH VRSTEV DEZINFEKČÍ

### LORIQAT

speciální kapalný přípravek pro mytí povrchů podléhajících dezinfekčnímu režimu

**vlastnosti:** účinně myje namáhané povrchy, neutralizuje a odstraňuje zaschlé zbytky dezinfekcí, omezuje vhodné prostředí pro výskyt mikroorganismů, zabraňuje lepení obuvi k podlaze, příjemně voní

**barva:** nažloutlý

**expirace:** 24 měsíce

**balení:** karton (18 lahví 500 gramů), láhev 500 gramů



**Poznámka:** Výrobky uvedené v katalogu jsou v souladu s legislativou platnou k datu vydání katalogu – leden 2011.



## DEZINFEKCE NÁSTROJŮ A PŘEDMĚTŮ

### DEZIPUR

práškový dezinfekční přípravek na nástroje, předměty a plochy

- aktivní látky:** benzalkoniumchlorid, kyselina peroxooctová, látky obsahující aktivní kyslík
- účinnost:** baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní, MRSA
- vlastnosti:** rozpouští organická znečištění, obsahuje inhibitory koroze, vhodný k dezinfekci ultrazvukem
- barva:** bílý (roztok bezbarvý)
- expirace:** 24 měsíce
- balení:** dóza 3 kilogramy, dóza 0,7 kilogramu



### SEPTAN

kapalný prostředek na dezinfekci chirurgických nástrojů, endoskopů

- aktivní látky:** glyoxal, glutaraldehyd, formaldehyd, benzalkoniumchlorid
- účinnost:** baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní
- vlastnosti:** vhodný i pro termolabilní materiály, účinná antikorozivní ochrana, nutná uzavřená dezinfekční vana
- barva:** světle žlutý až nahnědlý
- expirace:** 24 měsíce
- balení:** kanystr 5 litrů



## DEZINFEKCE HEMODIALYZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ



### RENOX

alkalický dezinfekční a čisticí prostředek pro sanitaci hemodialyzačních monitorů

- aktivní látky:** chlornan sodný
- účinnost:** baktericidní, fungicidní, virucidní
- vlastnosti:** obsahuje inhibitory koroze, netvoří inkrusty
- barva:** žlutozelený
- expirace:** 6 měsíců
- balení:** kanystr 5 litrů



## DEZINFEKCE A HYGIENA POKOŽKY

### MANEPT

alkoholový přípravek k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou a k dezinfekci pokožky

- aktivní látky:** propan-2-ol, peroxid vodíku, chlorhexidylglukonát
- účinnost:** baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní, účinný proti chřipkovým virům
- vlastnosti:** nebarví pokožku, příjemně voní
- barva:** bezbarvý
- expirace:** 24 měsíce
- balení:** kanystr 5 litrů, láhev 0,5 litru, láhev 0,5 litru s dávkovačem



### MANOX

alkoholový přípravek k hygienické dezinfekci rukou a k dezinfekci pokožky

- aktivní látky:** propan-2-ol, peroxid vodíku, KAS
- účinnost:** baktericidní, fungicidní
- vlastnosti:** nebarví pokožku, příjemně voní
- barva:** bezbarvý
- expirace:** 24 měsíce
- balení:** kanystr 5 litrů, láhev 0,5 litru, láhev 0,5 litru s dávkovačem



### ARIOSO SEPT

tekutý mycí prostředek pro hygienické mytí pokožky a rukou s antimikrobiální přísadou

- aktivní látky:** triclosan
- účinnost:** gram+ a gram- bakterie
- vlastnosti:** nedráždivý, lehce parfémovaný, zabraňuje vysušování pokožky
- barva:** opalescentní bílý
- expirace:** 18 měsíců
- balení:** kanystr 5 litrů, láhev 0,5 litru s dávkovačem



### ARIOSO LAUDY

regenerační tekutý krém na ruce

- aktivní látky:** kombinace olejů a včelího vosku
- vlastnosti:** vysoký hydratační účinek, nezanechává pocit mastných rukou, příjemně voní
- barva:** bílý
- expirace:** 24 měsíce
- balení:** láhev 0,5 litru s „push-pull“ uzávěrem, láhev 0,5 litru s dávkovačem









Doporučujeme dávkovače ARIOSO

[www.lorika.cz](http://www.lorika.cz)

[www.arioso.cz](http://www.arioso.cz)

# DEZINFEKČNÍ PLÁN

oblast použití	přípravek	koncentrace	množství / expozice	účinnost	postup / četnost
 <b>Mytí s dezinfekčním účinkem (kumulativní efekt)</b> Ordinace, lůžková oddělení, chodby, WC	DEZOX SANITEN LORISAN DESUR DEZIKON	0,5% 0,5 – 0,75% 0,5% 0,5% 0,5%	30 min/z. 30 min/z. 5 min/z. 30 min/z. 30 min/z.	A AV AV AV AV	Pracovním roztokem otřít plochu do mokra a nechat zaschnout. Četnost dle provozního řádu, min. 1x denně
<b>Jednofázová dezinfekce povrchů a předmětů</b> Operační sály, ARO, JIP, infekční a plicní oddělení, novorozenecká oddělení, laboratoře	DEZOX LORISAN DESUR DEZIKON	1% 1% 2% 1% 1%	30 min/z. 30 min/z. 8 min/z. 30 min/z. 30 min/z.	AB ABV ABV ABV ABTMV	Pracovním roztokem otřít plochu do mokra a nechat zaschnout. Četnost dle provozního řádu. Operační sály po každém výkonu. Předměty otřít, ponořit nebo do nich roztok nalít.
 <b>Dezinfekce postřikem</b>	GUTTAR	neředěný	1–5 min 15 min 60 min	A AB ABTM	Rozprašovačem nastříkat na plochy nebo předměty, neotírat. Hrubé nečistoty umýt předem.
 <b>Odstraňování zaschlých vrstev dezinfekcí</b>	LORIQAT	0,5% 2%	5 min 1 min		Nanést na plochu a nechat působit. Setřít do sucha a omýt čistou teplou vodou.
 <b>Dezinfekce a čištění chirurgických nástrojů, plastů, skla</b>	DEZIPUR SEPTAN	1,5% 1% 2% 3%	30 min 60 min 30 min 60 min	ABTMV AB AB ABTM	Ponořit do roztoku, exponovat, dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit, sterilizovat. Používat uzavřenou dezinfekční vanu.
<b>Dezinfekce endoskopů (předčištění)</b>	SEPTAN	2% 3%	30 min 15 min	AB AB	Okamžitě po použití zvnějšku nástroj otřít, pročistit kanály, ponořit do roztoku, exponovat. Dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit, sterilizovat.
 <b>Hemodialyzační přístroje</b>	RENOX	3%	20 min	AB	Použit podle pokynů výrobce přístroje.
 <b>Mytí rukou</b>	ARIOSE SEPT	neředěný	potřebné množství		Dle potřeby. Před HDR a CHDR. Rozetřít s trochou vody, opláchnout, osušit.
<b>Hygienická dezinfekce rukou (HDR)</b>	MANOX MANEPT	neředěný	3 ml/30 s 3 ml/30 s 3 ml/2 min	A A ATM	Po kontaktu s kontaminovaným materiálem, po a před ošetřovatelskými úkony.
<b>Chirurgická dezinfekce rukou (CHDR)</b>	MANEPT	neředěný	2x 3 ml/ opakovat za 1,5 min (celkem 3min)	ABTM	Před operačním zákrokem rozetřít na rukou a předloktí. Nechat zaschnout.
<b>Dezinfekce pokožky</b>	MANOX MANEPT	neředěný	1 min	A	Několikrát řádně zavlhčit přípravkem pomocí sterilního tamponu
<b>Ošetření a regenerace rukou</b>	ARIOSE LAUDY	neředěný	dle potřeby několikrát denně		Malé množství krému rozetřít na čistých a suchých rukách.
<b>Ostatní</b>					
<b>Koupací vany</b>	DEZIPUR	2%	2–5 min.	AV	Omýt připraveným roztokem, exponovat, opláchnout čistou vodou.
<b>Dezinfekce prádla</b>	DEZIKON	0,5% 1%	30 min 30 min	AV ABTMV	Zcela ponořit do roztoku.
<b>Nádobí a přístroje</b>	DEZIKON	1%	30 min	ABTMV	Zcela ponořit do roztoku. Po dezinfekci řádně opláchnout pitnou vodou.
<b>Umývadla, bidety, pisoáry, toalety</b>	DEZIKON	1%	30 min/z.	ABTMV	Omýt připraveným roztokem, nechat zaschnout.

Pro úklid a dezinfekci používat vodu o teplotě 20 – 25 °C.  
Saniten lze ředit vodou o teplotě až 50 °C.

**A** usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub (kvasinky) **B** virucidní účinek na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů) potvrzena (**B**) omezená virucidní účinnost (účinnost na HBV/HIV potvrzena) **C** inaktivace bakteriálních spór **T** usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis **M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií **V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísňe) doložený laboratorními expertizami

[www.hygiene.cz](http://www.hygiene.cz)  
[www.hygiene.sk](http://www.hygiene.sk)

## TABULKA ŘEDĚNÍ

požadovaný objem roztoku	požadovaná koncentrace pracovního roztoku					
	0,50%	0,75%	1,00%	1,50%	2,00%	3,00%
0,5 l	2,5	3,8	5,0	7,5	10,0	15,0
1,0 l	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0
2,0 l	10,0	15,0	20,0	30,0	40,0	60,0
3,0 l	15,0	22,5	30,0	45,0	60,0	90,0
4,0 l	20,0	30,0	40,0	60,0	80,0	120,0
5,0 l	25,0	37,5	50,0	75,0	100,0	150,0
8,0 l	40,0	60,0	80,0	120,0	160,0	240,0
10,0 l	50,0	75,0	100,0	150,0	200,0	300,0

Množství dezinfekčního prostředku v ml (koncentráty) nebo v g (prášky).

červen 2011

## Kontakty a objednávky:

**LORIKA CZ s.r.o.**  
Holická 312  
779 00 Olomouc  
Tel. +420 581 112 410  
Fax +420 581 112 466  
e-mail: [lorika@lorika.cz](mailto:lorika@lorika.cz)  
[www.lorika.cz](http://www.lorika.cz)

LORIKA CZ s.r.o., Náchod  
Tel./fax +420 491 423 618  
e-mail: [nachod@lorika.cz](mailto:nachod@lorika.cz)

LORIKA CZ s.r.o., Teplice  
Tel./fax +420 417 577 497  
e-mail: [teplce@lorika.cz](mailto:teplce@lorika.cz)

**LORIKA SLOVAKIA s.r.o.**  
Langsfeldova 2  
036 01 Martin  
Tel. +421 434 220 057  
Fax +421 434 287 277  
e-mail: [lorika@lorika.sk](mailto:lorika@lorika.sk)  
[www.lorika.sk](http://www.lorika.sk)